

Pozwolenie Urzędu
Rejestracji
Produktów Leczniczych,
Wyrobtów Medycznych
i Produktów Biobóycznych
nr 8741/22



Clinex DEZOMed

Preparat dezynfekująco-myjący
Gotowy do użycia

- Skuteczny w obszarze medycznym
- Skuteczny na koronawirusy
- Skuteczny na wirus H1N1, HBV

Dostępne opakowania:

Indeks	Nazwa indeksu
77-032	Clinex DezoMed 1L
77-033	Clinex DezoMed 5L



Właściwości:

Gotowy do użycia, bezaldehydowy, preparat dezynfekująco-myjący o szerokim spektrum działania. Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze (wobec wirusów polio i adeno) w obszarze ogólnym oraz działanie wirusobójcze (wobec wirusów polio i adeno) bakteriobójcze, bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych w obszarze medycznym. Skutecznie usuwa krew oraz białka występujące głównie w obszarze medycznym. Nowoczesna formuła wzbogacona jest o dodatki wspomagające usuwanie bieżących zabrudzeń. Doskonale nadaje się do dezynfekcji pomieszczeń szczególnie narażonych na wzmożony ruch w placówkach służby zdrowia. Dzięki swojej nisko pieniącej formule, preparat nadaje się do mycia ręcznego, jak i maszynowego. Przy regularnym stosowaniu znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia. Preparat jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Idealnie sprawdzi się w dezynfekcji takich obszarów jak: szpitale, placówki służby zdrowia, przychodnie, hospicja, domy opieki.

Sposób użycia:

1. Usunąć z powierzchni wszelkiego typu zanieczyszczenia.
2. Za pomocą ściereczki, trygera lub poprzez namaczanie równomiernie rozprowadzić produkt na dezynfekowaną powierzchnię. Powierzchnie powinny być wilgotne przez cały czas kontaktu.
3. Po osiągnięciu wymaganego czasu ekspozycji, powierzchnie słuukać wodą o jakości wody pitnej lub przetrzeć wilgotną ściereczką.

UWAGA:

- Produkt tylko do użyciu profesjonalnego
- Przed pierwszym użyciem produktu, zaleca się sprawdzenie jego działania w mało widocznym miejscu.
- Po dezynfekcji wszystkie powierzchnie mające kontakt z żywnością powinny być słuukane bieżącą wodą celem usunięcia pozostałości środków powierzchniowo czynnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Chronić od źródeł ciepła.
- Nie wystawiać opakowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:

- Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu.



Po dezynfekcji wszystkie powierzchnie mające kontakt z żywnością powinny być spłukane bieżącą wodą celem usunięcia pozostałości środków powierzchniowo czynnych.

SPEKTRUM DZIAŁANIA PRODUKTU DEZOMed W OBSZARACH MEDYCZNYCH

SPEKTRUM	Norma według EN 14885	CZAS w minutach
BAKTERIE	EN 13727	5 ¹
	EN 13697	5 ¹
	EN 16615	1 ¹
	EN 14561	15 ^{2*}
DROŹDZE	EN 13624	5 ¹
	EN 13697	5 ¹
	EN 14562	15 ^{2*}
	EN 16615	1 ¹
WIRUSY BEZOTOCZKOWE	EN 14476 (POLIOVIRUS)	30 ^{2*}
	EN 14476 (ADENOVIRUS)	15 ^{1,2*}
	EN 14476 (MURINE NONOVIRUS)	5 ^{2*} 15 ¹
WIRUSY OTOCZKOWE	EN 14476:2013+A1:2015 (VACCINIA VIRUS)	5 ¹
	EN 14476 (H7N9)	5 ¹
	EN 14476:2013+A1:2015 (H1N1)	5 ¹
	EN 14476 (DUCK HEPATITIS B surogat dla HBV)	5 ¹
	EN 14476 (BOVINE CORONA VIRUS surogat dla MERS-CoV)	1 ^{2*}
	TEST ACORDING TO VAH (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, C.albicans)	5 15 ^{1,2*} 30
	Tested According to BGA (RKI) and DW (testy z obciążeniem glebą)	Poliovirus ECBO Virus Adenovirus Norovirus Rota Virus Vaccina Virus Polyoma Virus SV 40
		15 30 30 30 15 5 30

* Warunki czyste (brak w próbce erytrocytów)

¹ Testy z wysokim ładunkiem organicznym

² Testy z niskim ładunkiem organicznym

SPEKTRUM DZIAŁANIA PRODUKTU DEZOMed W OBSZARCH ZWIĄZANYCH Z ŻYWNOŚCIĄ, PRZEMYSŁOWYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Testy na próbkach bez erytrocytów za wyjątkiem wirusów.

SPEKTRUM	Norma według EN 14885	CZAS w minutach
BAKTERIE	EN 1276 (E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)	5 ^{1,2,3,6}
	EN 1276 (MRSA)(S.aureus MRSA)	5 ⁶
	EN 1276 (L.monocytogenes, S.typhimurium)	5 ⁷
	EN 13697 (E.coli, S. aureus, E.hirae, P. aeruginosa)	5 ⁶
	EN 13697 (S. typhimurium)	5 ⁶
	EN 13697 (L.monocytogenes)	5 ⁶
	EN 16615 (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)	5 ⁶
	EN 1276 (E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)	10 ⁶
	EN 1276 (modified) (L.interrogans)	5 ⁶
	EN 13697 (E.coli, S. aureus, E.hirae, P. aeruginosa)	10 ¹ , 15 ⁶
DROŻDŻE	EN 1650 (C.albicans)	15
	EN 13697 (C.albicans)	15
	EN 16615 (C.albicans)	1 ⁸
	EN 1650 (C.albicans)	10 ⁷
	EN 13697 (C.albicans)	10 ⁷
WIRUSOBÓJCZY PRZECIWKO BAKTERIOFAGOM	EN 13610 (Lactococcus lactis subsp. Lactis phage P001)	15 ¹
	EN 13610 (Lactococcus lactis subsp. Lactis phage P008)	15 ¹
WIRUSY BEZOTOCZKOWE	EN 14476 (Murine Norovirus)	5 ⁷ , 15 ⁸
	EN 14476 (Adenovirus Type 5)	15 ^{7,8}
WIRUSY OTOCZKOWE	EN 14476:2013 +A1:2015 (Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA))	5 ⁸
	EN 14476 (Influenza A (H7N9) Virus)	5 ⁸
	EN 14476:2013 +A1:2015 (Influenza A (H1N1) Virus)	5 ⁸

¹ Testy z dodatkiem mleka odtłuszczonego

² Testy z dodatkiem sacharozy

³ Testy z dodatkiem ekstraktu drożdżowego

⁴ Testy z dodatkiem albuminy

⁵ Testy z dodatkiem erytrocytów

⁶ Testy z wysokim ładunkiem organicznym

⁷ Testy z niskim ładunkiem organicznym

⁸ Testy z dużym obciążeniem organicznym z dodatkiem erytrocytów

